

PRISE DE MUQUEUSE BUCCALE (Salive)

Il est préférable de ne pas exécuter cette procédure dans un délai de moins d'une heure après un repas ou après d'avoir bu. Il est possible que dans ce cas il n'y ait pas assez de muqueuse buccale pour l'analyse d'ADN.

Procédure:

1. Mettez une feuille de papier blanche sur la table et ouvrez le tube en plastic (couvercle bleu). Faites attention de ne pas toucher le bord du tube. Contrôlez le numéro sur le tube avec le numéro sur le document que vous devez signer.



2. Ouvrez la brosse emballée du côté postérieur.




3. Prenez la brosse de l'emballage du côté postérieur et faites attention que vous ne touchez pas la brosse avec les mains.



4. Mettez la brosse dans la bouche contre la joue droite et frottez-la pendant 30 secondes pour absorber la muqueuse buccale.



5. Mettez la brosse dans le tube en plastic.

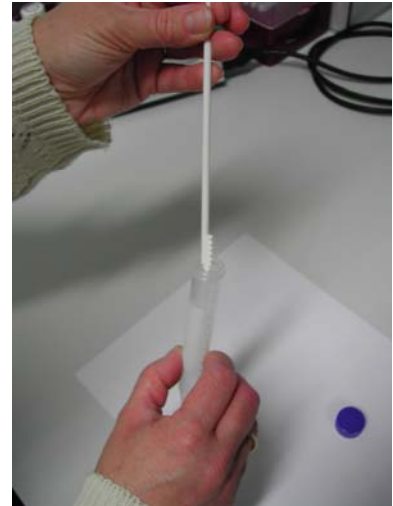

6. Poussez sur le bouton du côté postérieur afin que la brosse tombe dans la tube.



7. Répétez la procédure des points 2 à 6 pour la joue gauche et fermez bien le tube avec le couvercle bleu.

